



Informationsblatt Desinfektionsverträglichkeit

Feb. 2025

Desinfektionsbeschreibung

Zur Einhaltung der hygienischen Standards Ihrer Einrichtungen ist ein entsprechendes Reinigen und Desinfizieren der Martin.Care Produkte selbstverständlich möglich.

Um eine optimale Anwendbarkeit und Funktionalität der Transponder auch nach einem Desinfektionsvorgang zu gewährleisten, hat die Firma Martin.Care GmbH entsprechende Tests durchgeführt. Die Materialien vertragen das Desinfektionsmittel, aber im Laufe der Zeit werden diese natürlich auch davon angegriffen. Um eine möglichst hohe Langlebigkeit unserer Komponenten zu erreichen ist eine Wischdesinfektion einer Tauchdesinfektion vorzuziehen.

Das Gewebeband ist auch mit einer Tauchdesinfektion zu behandeln. Hier gilt, dass im Laufe der Zeit der Kunststoff verschleißt. Nach mehrmaliger Tauchdesinfektion oder bei einem Benutzerwechsel empfehlen wir einen Tausch des Gewebebandes.

Verwendete Desinfektionsmittel

In den Tests wurden folgende Desinfektionsmittel für das Reinigen verwendet:

- schülke mikroqid[®] sensitiv liquid

Die Materialverträglichkeit von mikroqid[®] sensitive liquid ist mit allen geprüften Materialien sehr gut. Eine alkoholfreie Schnelldesinfektion von Oberflächen ist mit mikroqid[®] sensitive liquid sehr gut anwendbar.

- schülke mikroqid[®] AF liquid

Die durchgeführten Teste belegen, dass mikroqid[®] AF liquid aus Sicht der Materialverträglichkeit sehr gut geeignet ist. Auf Grund der Flüchtigkeit des Desinfektionsmittels besteht üblicherweise nur ein kurzzeitiger Produktkontakt, bei dem keine Unverträglichkeiten zu erwarten sind. Jeglicher Kontakt (auch kurzzeitig) zwischen mikroqid[®] AF liquid und Plexiglas ist zu vermeiden.

- schülke puresept[®]

puresept[®] ist ein Konzentrat, basierend auf quartären Ammoniumverbindungen, zur Desinfektion und Reinigung von Oberflächen und Medizinprodukten. Die üblichen Einsatzkonzentrationen sind 0,5 % und 1,0 %. Die Materialverträglichkeit von puresept[®] ist mit allen geprüften Materialien sehr gut.

Ergänzende Informationen

Um ergänzende Produktinformationen zu erhalten, können Sie die folgenden QR-Codes scannen und gelangen so auf die verschiedenen Bereiche in unserer Wissensdatenbank.



Datenblattsammlung

Hiermit erklärt Martin.Care GmbH, dass die genannten Artikel den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, sowie 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf unserer Internetadresse verfügbar.

Der Inhalt wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt und beruht auf Informationen, die als verlässlich gelten. Eine Haftung für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden.

Copyright

©2025, Martin.Care GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Martin.Care GmbH weder ganz noch teilweise vervielfältigt, in einem Datenbanksystem gespeichert oder in welcher Form auch immer – elektronisch, fotokopiert oder magnetisch aufgezeichnet – weitergegeben werden.

Haftungsausschluss

Unser Bestreben ist es, unsere Produkte und entsprechende Unterlagen mit größtmöglicher Sorgfalt zu entwickeln, herzustellen und zu dokumentieren. Martin.Care GmbH übernimmt jedoch keinerlei Verpflichtung oder Garantien für den Inhalt dieser Dokumentation und lehnt insbesondere jegliche Haftung für die Handelsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Daneben behält sich Martin.Care GmbH vor, diese Veröffentlichung zu überarbeiten und gelegentliche Änderungen vorzunehmen, ohne dass sich daraus die Verpflichtung für Martin.Care GmbH ergibt, beliebige Personen von solchen Überarbeitungen benachrichtigen zu müssen.